

2 Подготовка и начало работы

2.1 Заполнение картриджа

1.



- Приготовьте следующие материалы:
- флакон или картридж с инсулином, нагретый до комнатной температуры;
 - картридж Акку-Чек Спирит 3,15 мл;
 - дезинфицирующий раствор или салфетка.

2.



Вымойте руки.

3.



Распакуйте картридж для инсулиновой помпы.

4.



Протрите резиновую мембрану инсулинового флакона/картриджа дезинфицирующей салфеткой.

5.



Оттяните поршень картриджа назад до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

6.



Введите иглу картриджа в резиновую мембрану флакона/картриджа с инсулином.

7.



Нажмите до упора на поршень и удерживайте его в этом положении.

8.



Медленно переверните систему, аккуратно удерживая все компоненты на своих местах.

9.



Медленно ослабьте давление на поршень, чтобы инсулин заполнил картридж. Если картридж заполнился не полностью, аккуратно потяните за поршень и наберите инсулин до конца.

10.



Удалите все пузырьки воздуха, постукивая по картриджу для помпы и выталкивая их обратно во флакон. Отсоедините инсулиновый флакон/картридж от картриджа для помпы.

11.



Удалите поршень, выкручивая его против часовой стрелки.

12.



Удалите вспомогательную насадку с иглой, выкручивая ее против часовой стрелки и одновременно вытягивая.


13.



Чтобы предотвратить вытекание инсулина, наденьте защитный колпачок на наконечник картриджа для помпы и нажмите на него (вы должны услышать щелчок). Поршень и вспомогательную насадку следует утилизировать согласно принятым правилам утилизации медицинских отходов.




2.2 Выбор инфузионного набора

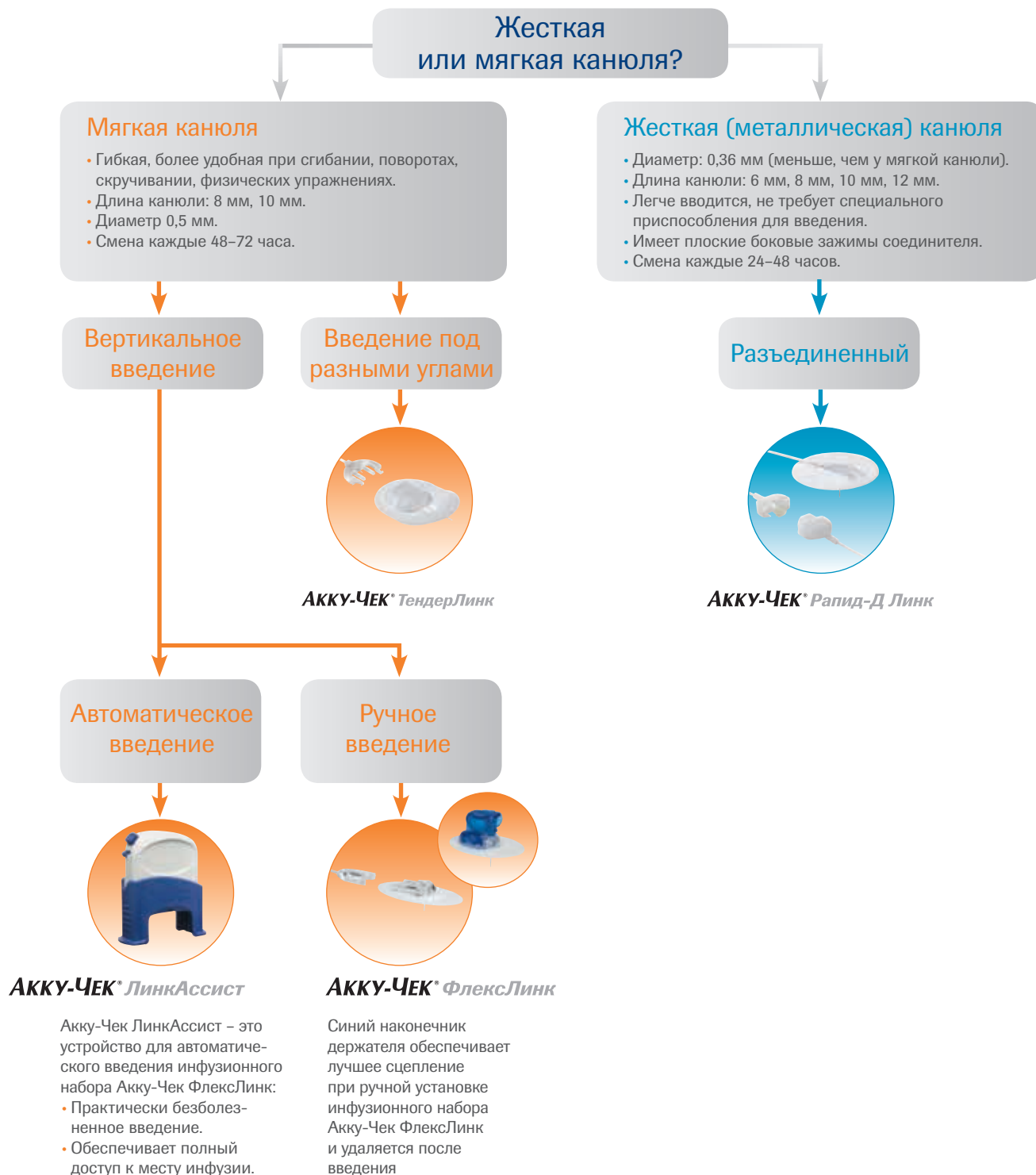

- Выбираете короткую канюлю, если объем подкожно-жировой клетчатки не выражен, и длинную, если он большой.
- Выбираете длину катетера с учетом расстояния между помпой и местом инфузии.

2.3 Выбор места введения инсулина

Места установки инфузионной системы

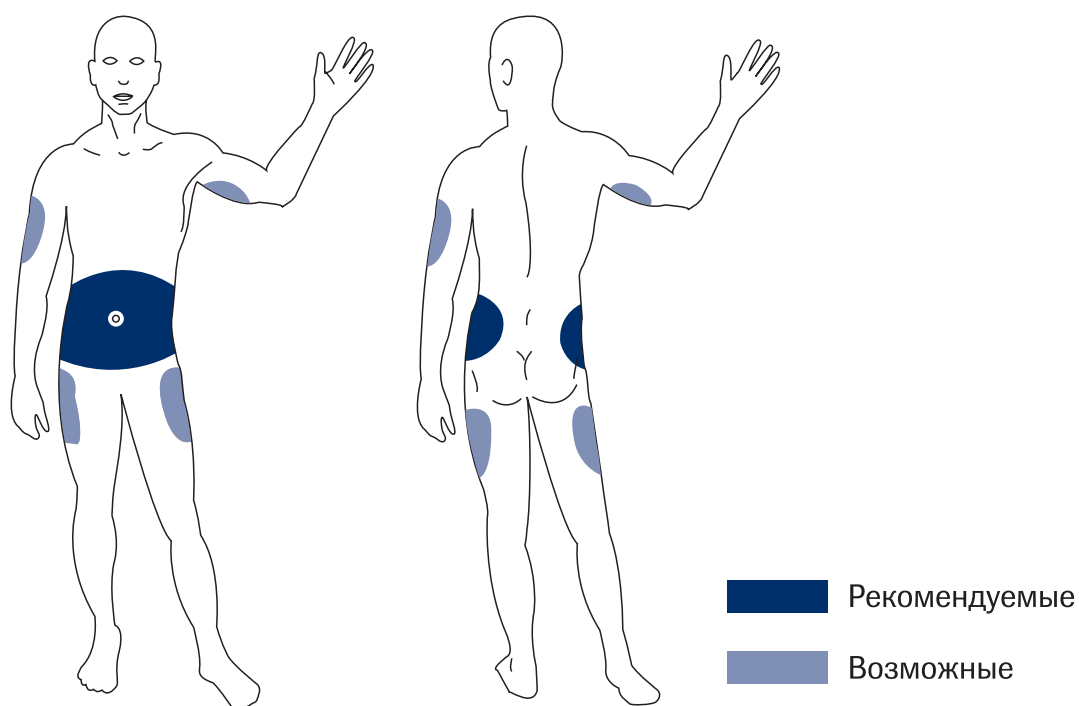

Выбирайте место введения инсулина подальше от линии талии, костей, рубцовой ткани, пояса брюк (юбки) и предыдущих мест введения инсулина.



2.4 Установка инфузионного набора на примере Акку-Чек ФлексЛинк

1.



Вымойте руки.

2.



Продезинфицируйте место введения согласно рекомендациям своего врача.

3.



Удалите защитный колпачок с иглы.


4.




Удалите с самоклеющейся пленки обе части подложки.



Сформируйте складку кожи.
Введите иглу-проводник и мягкую канюлю
в место введения под углом 90°.

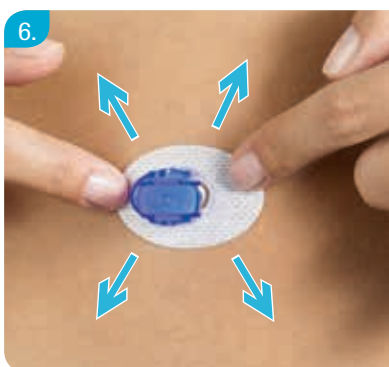

Разгладьте пальцами самоклеющуюся пленку,
чтобы обеспечить хорошее сцепление
с кожей.

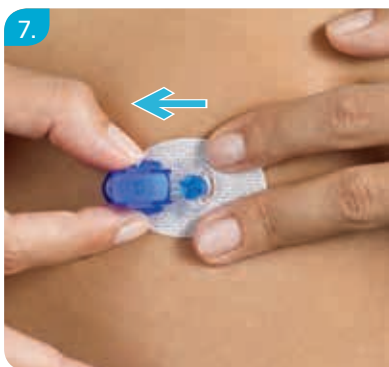

Удалите синий наконечник держателя,
нажав на боковые зажимы и вытягивая
наконечник по направлению стрелки.



*Не забудьте заполнить канюлю, как указано в инструкции
к инфузионному набору.*

8.



Извлеките иглу-проводник под углом 90°.

9.



После подготовки помпы заполните и присоедините инфузионную систему, как описано в разделах 3.8–3.11 (стр. 33–39). Убедитесь, что в ней нет пузырьков воздуха.